



右左スクロール
2回連続押しで右端、左端へ移動



2回連続押しで上端、下端へ移動
スクロール



故障かな?と思ったらリセットボタンを押して再度電源を入れてください

ご使用の前にサービスマニュアルをご一読ください



【サービスマニュアル】

各機能の説明や設定方法、お客様が使いやすいようにカスタマイズできる方法などが記載されています。

ESCHENBACH

拡大読書器ヴィゾルクスデジタル XL FHD スタートアップガイド

FAQ よくあるお問合せ

・SDカードに保存した画像の消去

メニュー



画像を呼び出し◀▶で消したい画像を選択。(画像を全画面表示した場合は本体  ボタンで戻る)
 を2回タップし  を2回タップすると消去。

・オートシャットオフの変更設定

メニュー



または



5分か8時間に変更可能。
サービスマニュアル P12 参照

・バッテリーの電池残量の確認



電源 ON で数秒後に左上に表示。サービスマニュアル P4 参照

・読書ラインの出し方

メニュー





2回タップで×を解除。サービスマニュアル P8,11 参照

・音量の設定

メニュー



タップで音量調節または音量オフ。   言語やボタン音設定。サービスマニュアル P9,13 参照

初めてご使用になる前に必ず内部充電バッテリーを完全に充電してください

電源コンセントを使用する場合でも、初めてお使いになる前に内部バッテリーをフル充電する必要があります。充電中は、差し込み口横の充電表示ランプが赤色で点灯します。充電が完了すると緑色に点灯します。バッテリー残量は電源を入れると画面左上に2秒間表示されます。

●付属品



ロービジョン専用相談窓口 ☎ 03-3293-8570 (平日 11時～16時)