



警告

- LEDライトは光源を絶対に直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
- 直射日光の下に放置することは絶対に避けてください。また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。



注意

- 長い間ご使用にならない時は、電池を取り出しておいてください。液漏れ等による故障が生じる場合があります。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 電池のプラスとマイナス方向を正しく入れてください。
- 電池は火中に投じないでください。怪我のもととなることもあります。

 ESCHENBACH

visolux⁺

ヴィゾ・ルクス・プラス No.1566

取扱説明書

この度はドイツ・エッセンバッハの「ヴィゾ・ルクス・プラス」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

保証書

商 品 名	ヴィゾ・ルクス・プラス	No.1566
お買上 年月日	年 月 日	
お買上 店名印		

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiwase@eschenbach-optik.co.jp <http://www.eschenbach-optik.co.jp>

初めて本製品を使用する前に

本機器を初めてご使用になる前には、まず電池ボックスのふたを矢印の方向にスライドさせ電池ボックスを開き、付属の乾電池（単3電池×3本）を+、-に注意しながら入れ、再び電池ボックスを閉じてください。



お手入れに関する注意事項

- レンズ用のやわらかい綿または眼鏡拭きなどの布を使用し、拭き取りは軽く行ってください。
- 汚れが甚だしい場合には、ブローアで埃を払ってから、眼鏡拭きで優しく拭いてください。
アルコール、または有機系薬品の入っている溶剤は、絶対に使用しないでください。
レンズが破損してしまうことがあります。
- 本機器を使わない時は必ず付属の専用ケースに入れて保管してください。

■ライトのオン・オフ

- ・スイッチを押すと、ライトを点灯・消灯することが出来ます。
- ・ライトは約30分後に自動的に消灯します。
- ・引き続き使用する際には、再びスイッチを押し、点灯させてください。

使用について

本機器を平らな面に設置してください。
非常に視野の広い本機器は写真や切手の観察にも適しています。

■LEDライトの「色」の変え方

オレンジ色の輝度調整板(①)をスライドすることでLEDランプの色を変えることが出来ます。



一般的には白色を使用し、まぶしさを
感じる場合はオレンジ色を使用します。

- 倍率 3倍(12Dpt)
- 商品サイズ(約) 縦130mm×横118mm×高さ85mm
- 材質 レンズ:PXM®光学樹脂
本体:ABS樹脂
- 付属品 専用ケース、取扱説明書
- 原産国 ドイツ
- 単3電池3個付き
(付属電池はテスト用ですので新しい電池をご利用下さい。)