

A 6 __表

山折り

警告

- MAX detail クリップをつけたまま絶対に太陽やその他明るい発光体を見ないで下さい。
- 本品をカバーなしで直射日光に当てないで下さい。
- 本品は車の運転にはご使用になれません。
- 本品を超音波洗浄器、及びアルコールや有機溶剤でのクリーニングはおやめ下さい。

注意

- 衝撃や強打、暖房機器や過度の暑さから避けてください。
- 小さなお子様の手が届かない所に保管してください。
- MAX detail クリップのレンズが直接メガネのレンズに当たらないようご注意ください。メガネのレンズが傷つく恐れがあります。

ESCHENBACH

MAXdetail-clip

No.1624-61 マックス・ディテールクリップ

取扱説明書

この度は、ドイツ・エッセンバッハの『マックスディテールクリップ』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本品を正しく、安全にお使いいただく為に取り扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読みいただけますよう大切に保管してください。

保証書

商 品 名 No.1624-61 マックスディテールクリップ
お買上 年月日 年 月 日
お買上 店名印

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiwase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

MAXdetail クリップは目から約 40cm
離れたところで焦点が合うように設計されています。

■ 使用方法



① クリップ部分に付属のゴム管を装着し、
お手持ちの眼鏡をクリップで挟んで
ご使用下さい。



② クリップを使用しない時は
取り外す必要はなく、クリップを
上に跳ね上げてください。



③ 最適な視点にするため、大きな眼鏡で
も小さな眼鏡でも、レンズの高さをク
リップで調節出来るようになっていま
す。小さなプラスドライバーでレンズ
のネジを外し、4段階でクリップアーム
に新しく締め直して頂けます。

- クリップは基本的に眼鏡の下部にレンズが来るようにお取り付け下さい。
そうすることにより眼鏡上方の部分はレンズにかぶらずに眼鏡のみの視界
となりますので、手元以外を見ることが出来て便利です。

■ 見づらいと感じた場合

- ・対象物までの距離が長すぎる、あるいは短すぎる可能性があります。
- ・MAXdetail クリップを斜めに取り付けているために、高さがあつて
いない可能性があります。
- ・MAXdetail クリップの適応瞳孔間距離に合っていない可能性があります。

■ メンテナンスについて

- ・木綿、またはリンネルの布（メガネクリーニングクロス等）で
クリーニングして下さい。
汚れがひどい場合はクリーニングクロスを少し湿らせてご使用下さい。
- ・レンズを埃やダメージから保護するため、同梱のケースに入れて
保管する事をお勧めします。

□品番	1624-61
□倍率	2倍
□作業距離	レンズから 350mm / 目から約 400mm
□適応瞳孔間距離	60 ~ 68mm
□視野	約 85mm