

## optaro®

### スタートガイド

#### 1. アプリをダウンロード

Apple App Store またはQRコードから、optaro®アプリをダウンロードします。Apple App Storeにログインするか、Apple IDとパスワードを入力する必要があります。



#### 2. optaro® のカメラ モジュールをオンにする

白い「オン/オフ」ボタンを押して、optaro®カメラモジュールをオンにします。  
上部のステータスLEDが青く点灯します。



#### 3. アプリを開く

スマートフォンでoptaro®アプリを開きます。



#### 4. 「次へ」を押します

optaro®アプリで「次へ」を押します。

オプタロアプリへようこそ

optaro カメラモジュールの電源を入れる



#### 5. 利用規約を確認します

利用規約を読み、同意する場合チェックボックスをタップし、チェックが入ったことを確認し「次へ」を押します。

アプリとoptaro®カメラモジュールを使用するには、利用規約に同意する必要があります。





#### 6. SSIDを入力

SSID (6桁) を入力します。SSIDは本体、または、取扱説明書に記載されています。次の2つの方法で入力します：

a) 指定されたフィールドに手動で入力する

b) QRコードをスキャンする

\*QRコードを読み取るために、カメラのアクセスを許可する必要があります。

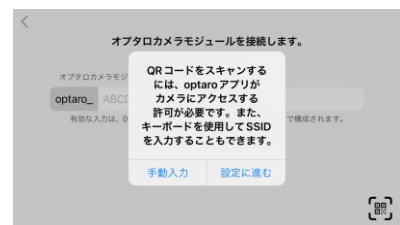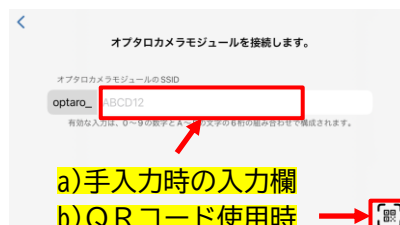

## 7. ローカルネットワークの許可

optaro®をアプリで使用できるようにするには、ローカルネットワーク接続を確立する必要があります。

「設定に進む」を押し、「ローカルネットワーク」のアクセスを「許可」します。（緑で許可）




## 8. カメラモジュールの接続

カメラモジュールとiPhoneの接続を行います。「接続」を押すと、通信（ペアリング）が始まります。

ペアリングが完了すると、再度接続許可画面が表示されます。「接続」を押すと、アプリの準備がスタートします。

接続が成功すると、カメラモジュールのステータスLEDが「青」から「緑」に変わり、アプリのメイン画面が表示されます。

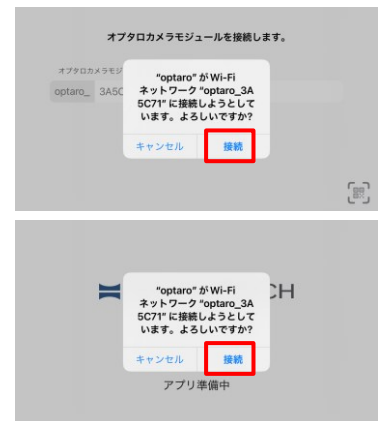




## 9. セッティング完了

optaro®をユニバーサルスタンド（付属）を使用するか、お持ちのiPhoneに対応するケース（別売り）装着します。アプリを終了するには、下から上にスワイプするか、ホームボタンを押します。



それでは、optaro®での読書をお楽しみください。

アプリとカメラモジュールをリセットするには、次の手順を行います。

1.  アプリで設定メニューを開きます。
2.  「工場出荷時の設定にリセット」を押します。  
この機能は、正しく接続されている場合（ステータスLEDが「緑」に点灯）、カメラモジュールも同時にリセットします。
3.  カメラモジュールが接続されていない場合は、カメラモジュールをリセットする必要があります。電源が入った状態で、ステータスLEDが点滅するまで（約10秒、ステータスLEDは途中消灯します）「オン/オフ」ボタンを長押しします。完了後、別のiPhoneでoptaro®に接続できます。