

**keplerian systems for focussing**  
ケプラーシステム単眼鏡

**取扱説明書**

品番	遠くを見るとき		近くを見るとき		対物レンズサイズ
	倍率	焦点調節可能距離	倍率	焦点調節可能距離	
1673-1	2.8	15cm~∞	3.4	15cm	9mm φ
1673-2	4.2	20cm~∞	5.5	20cm	10mm φ
1673-3	4.2	20cm~∞	5	20cm	12mm φ
1673-4	6	25cm~∞	7.6	25cm	16mm φ

**保証書**

商品名 ケプラーシステム単眼鏡  
 品番 1673-1,1673-2,1673-3,1673-4  
 お買い上げ日 年 月 日  
 お買い上げ店名・印

上記お買い上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上の欠陥に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理もしくは交換を致します。但し不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意、落下、浸水、天災、当社以外での修理、改造等による場合には保証期間中といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号  
 E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

**焦点の合わせ方**

ダイヤルを回して鏡筒を伸縮させ、焦点を合わせます。

近いところに焦点を合わせるとき  
⇒ 鏡筒を伸ばす



遠いところに焦点を合わせるとき  
⇒ 鏡筒を縮める



**フィンガーリング (別売: No.1671-1) の取付方法**


**鏡筒を伸ばします**

焦点調節ダイヤルとアイピースをしっかり持って、焦点調節ダイヤルを後ろに回して鏡筒を伸ばします。



**鏡筒からアイピースを外します**

鏡筒の▼の部分とアイピースをしっかり持って、アイピースを手前に回して鏡筒から外します。

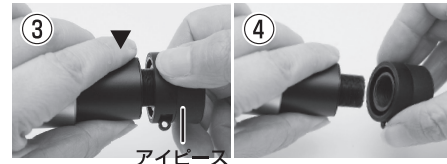

**フィンガーリングを取り付けます**

フィンガーリングを写真⑤⑥のように取り付け、アイピースを元の通りに鏡筒に付けます。(しっかり最後まで締めてください)

