

- 警告**
- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
 - 直射日光の下に放置することは絶対に避けてください。また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。
- 注意**
- 破損の恐れがありますので、落とすなど強い衝撃を与えないでください。
 - アルコール、有機系薬品の入っている溶剤は使用しないでください。レンズが変色や破損をすることがあります。
 - レンズの汚れはレンズ拭き等で優しく拭き取ってください。
 - 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

目とレンズの距離を正しく保たないと、鮮明な拡大像になりません
目とレンズの正しい距離は倍率によって異なります（下記参照）

<ブラックルーペ(2655シリーズ)基本スペック表>

| No. | 倍率 | Dpt. | 目とレンズの適正距離 (cm) | レンズサイズ(形状) |
|----------|-----|------|-----------------|------------|
| 2655-50 | 6 | 24 | 10cm | 50mmΦ |
| 2655-60 | 5 | 20 | 14cm | 58mmΦ |
| 2655-70 | 4 | 16 | 15cm | 70mmΦ |
| 2655-750 | 3.5 | 10 | 25cm | 50×75mm角型 |
| 2655-150 | 3 | 7.6 | 25cm | 50×100mm角型 |
| 2655-175 | 2.8 | 7 | 25cm | 75×100mm角型 |

■ドイツ製

ESCHENBACH

aspheric II

ブラックルーペ No.2655-シリーズ

取扱説明書

この度はドイツ・エッセンバッハの「ブラックルーペ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

保証書

商品名 ブラックルーペ No.2655-シリーズ
お買上年月日 年 月 日
お買上店名印


お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意（落下、水浸等）天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

使用方法

ブラックルーペのレンズは非球面レンズです。非球面レンズには表裏がありますので必ず表側から拡大してください

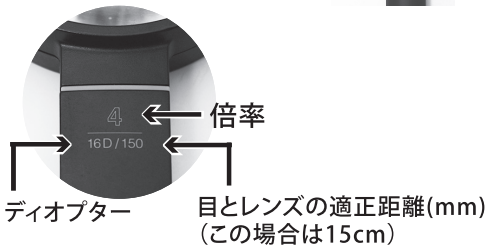

ブラックルーペ本体の表は「倍率」「ダイオプター（レンズの屈折率のこと。倍率算出時の基準）」「目とレンズの適正距離」を表しています。目とレンズの適正距離を守って使用しますとはっきりとした拡大像が得られます。

ネックストラップ用の穴の引き出し方

- ① ルーペを裏返します。
- ② グリップ先の水色のギザギザ部分に親指の爪を引っ掛け、矢印方向に引っ張ります。
- ③ 爪で最後まで引き出せない場合は、指ではさんで引き出します。