

A6 表面（外側）

山折

警告

- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
- 直射日光の下に放置することは絶対に避けてください。
また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。

注意

- 破損の恐れがありますので、落とすなど強い衝撃を与えないでください。
- アルコール、有機系薬品の入っている溶剤は使用しないでください。レンズが変色や破損をすることがあります。
- レンズの汚れはレンズ拭き等で優しく拭き取ってください。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

ESCHENBACH

mediplan ergo

メディプランエルゴ No.2668シリーズ

取扱説明書

この度は、ドイツ・エッセンバッハの『メディプランエルゴ』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本品を正しく、安全にお使いいただく為に取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読みいただけますよう大切に保管してください。

保証書

商 品 名 メディプランエルゴ No.2668シリーズ
お買上 年月日 年 月 日
お買上 店名印

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiwase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

A6 裏面 (内側)

谷折

ゆがみを抑えた手持ちルーペ

■ 精密無収差レンズ2枚構成採用


— レンズの収差(拡大像のゆがみ)をすみずみまでカット。

■ グリップは持ちやすさを追求したエルゴノミックデザイン

— 手に優しい、疲れにくい設計です。

■ エッセンバツハ独自開発PXM®光学樹脂レンズ採用

傷が付きにくく、明るく拡大します。

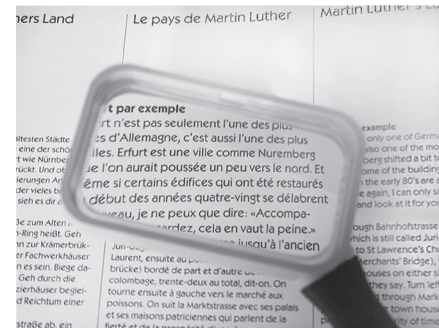

	倍率	Dpt.	レンズサイズ	レンズ材質	レンズ種類	本体サイズ
2668-50	4.5	14.0	50mm φ	PXM® 光学樹脂	—	66 × 160 × 17mm
2668-60	3.8	11.3	60mm φ		—	66 × 160 × 17mm
2668-75	2.9	7.4	75mm φ		—	82 × 180 × 18mm
2668-85	2.4	5.6	85mm φ		—	92 × 190 × 18mm
2668-950	2.7	7.0	50 × 90mm 角型		—	レンズ部 62 × 103 × 18mm (グリップ長103mm)

■ドイツ製