

**警告**

- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
- 直射日光の下に放置することは絶対に避けてください。また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。

**注意**

- 破損の恐れがありますので、落とすなど強い衝撃を与えないでください。
- アルコール、有機系薬品の入っている溶剤は使用しないでください。レンズが変色や破損をすることがあります。
- レンズの汚れはレンズ拭き等で優しく拭き取ってください。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

ESCHENBACH

round-the-neck magnifiers

ネックルーペ No.2678

取扱説明書

この度はドイツ・エッセンバッハの「ネックルーペ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

保証書	
商 品 名	ネックルーペ No.2678
お買上 年月日	年 月 日
お買上 店名印	
<p>お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合は、無償にて修理若しくは交換致します。                      但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。</p> <p>株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン                      〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号                      E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp</p>	


# 内側

## 谷折り

■「2 + 4 ×」の表示ラベルが上になるようにしてご使用ください。

■ひもを首に掛け、ルーペの胸当て部が胸の部分に来るようにひもの長さを調節します。

■読書や刺繍などの一般の作業には大きいレンズ(2倍)をご使用ください。針に糸を通したり、細かい部分のチェックなどの細かい作業には手元の丸いレンズ(4倍)をご使用ください。

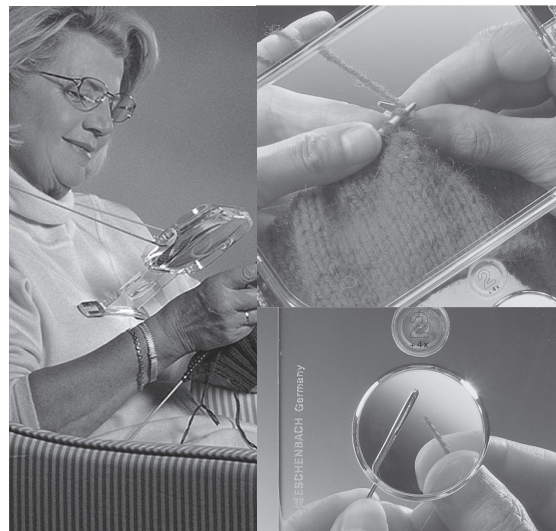

□No.2678 ネックルーペ

レンズ：PXM®光学樹脂(軽量バイコンベックスレンズ)  
本体サイズ(約)：195×165×19mm

レンズサイズ(約)：100×140mm(倍率：2倍)  
38mmφ(倍率：4倍)