

警告

- レンズを通して太陽や極度に明るい照明を直視することは絶対に避けてください。
- 使用しながらの歩行や車の運転は絶対に行わないでください。
- ピントが合っていない状態で使用しないでください。
使用している時、眼に疲労を感じたり気分がすぐれないと感じたら直ちに使用を中止してください。
日光が当たる場所に置かないでください。
- 焦点レンズ作用により火災の危険があります。
- 乱暴に扱ったりショックを与えたりしないでください。
また、極度に熱くなる所への放置は避けてください。

注意

クリーニングには、アルコールや有機的溶剤を使わないでください！
流水で洗ったり、超音波洗浄器でのクリーニングは行わないでください！



眼鏡の上からはかけられません。
眼鏡をかけている方は外してご使用ください。

ESCHENBACH

ridoMED teleMED

リド・メッド/テレ・メッド No.1634/6シリーズ

取扱説明書

この度はドイツ・エッセンバッハの「リド・メッド/テレ・メッド」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

保証書

商 品 名	リド・メッド/テレ・メッド No.1634/6シリーズ
お買上 年月日	年 月 日
お買上 店名印	

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiwase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp